




Návod k použití


Příprava

1

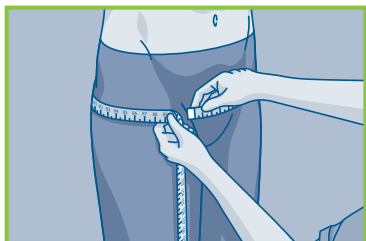


Změřte boky a pas; pro výběr správné velikosti pomůcky použijte větší z těchto dvou rozměrů.

2

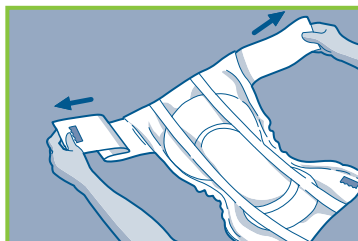

Pomůcku úplně rozevřete, každý pás otevřete samostatně. Díl s pásy umístěte dozadu a před použitím kalhotek zkontrolujte, zda jsou pásy plně rozevřeny. Zkontrolujte, zda se spodní strana kalhotek nachází směrem ven a měkká bílá vnitřní část směřuje směrem k pokožce.


3

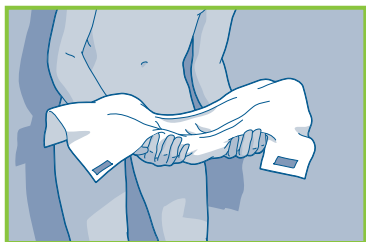

Kalhotky podélně přeložte a nepatrně vytvarujte do tvaru misky. Ochranné bariéry se takto mírně vztyčí.

Nasazení

4

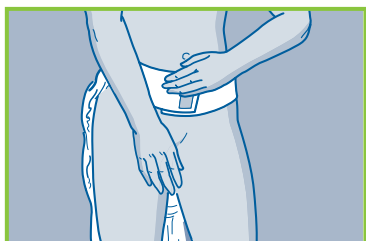

Pásy umístěte kolem těla a zajistěte pomocí modrých fixačních pásků.

5



Kalhotky musí být vytvarovány tak, aby tvořily jakousi misku. Kalhotky opatrně protáhněte mezi hýžděmi zezadu směrem dopředu. Vytáhněte je dopředu a nahoru tak, aby dobře seděly.

6



Kalhotky vyrovnejte a vytáhněte je směrem nahoru k pasu. Pomůcku zajistěte pomocí modrých fixačních pásků.

Rady a tipy

Výběr

- Kalhotky Attends Flex vybírejte podle rozměrů boků a pasu – zvolte vždy větší z těchto dvou rozměrů.
- Absorpční schopnost vyberte podle množství unikající moče. Nejdříve vyberte nižší stupeň absorpce – například stupeň 8 – a až potom vyberte vyšší stupeň absorpce; kalhotky tak budou více diskrétní a budou pohodlně sedět.
- Kalhotky Flex nabízejí účinné řešení pro pacienty, kteří mohou používat tvarované kalhotky.

Výměna

- Zkontrolujte indikátor vlhkosti – pokud indikátor vlhkosti vymizel na více než polovině délky svého jádra (60 %), musí se výrobek vyměnit. Pokud tomu tak není, lze výrobek dále používat.
- Čisté a suché plenkové kalhotky lze po použití toalety opakovaně použít.
- Znečištěné kalhotky vytáhněte směrem dozadu, pokud je to možné.
- Pokožku očistěte podle vašich postupů. Čistěte směrem zepředu dozadu.
- Pokud je to možné, nepoužívejte krémy na bázi oleje. Pudry by se neměly používat vůbec; ovlivňují absorpční schopnost pomůcky, brání vstřebávání moče a může dojít k poškození pokožky.

Nasazení

- Kalhotky podélně prohněte a vytvarujte.
- Při nasazování kalhotek ponechte pás na zadní straně – takto máte jistotu, že jsou kalhotky správně umístěné.
- Vycentrujte kalhotky podle indikátoru vlhkosti.
- Pokud nasazujete kalhotky u ležícího pacienta, postupujte stejným způsobem, jako u stojícího pacienta.

Únik

- Zkontrolujte výběr a nasazení kalhotek.
- Zkontrolujte, zda máte správnou velikost kalhotek.
- Kalhotky s vyšší absorpční schopností vyberte až poté, co se ujistíte, že problém není ve špatném nasazení, a po klinickém zhodnocení.

Likvidace

- Kalhotky srolujte a zlikvidujte podle vašich postupů pro likvidaci odpadů.
- Kalhotky nesplachujte do toalety.

Attends® Flex



Výrobky Attends Flex testuje a schvaluje proDERM, Institut pro aplikovaný dermatologický výzkum.

Další informace najdete na www.attends.cz