





Návod k použití


Příprava

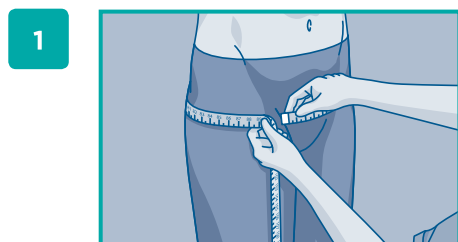

Změřte boky a pas a větší z těchto dvou měření určuje správnou velikost vybraných kalhotek.

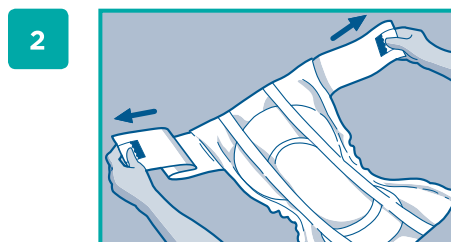


Kalhotky úplně otevřete a okraj s křídélky a fixačními páskami umístěte dozadu, tak aby před nasazením kalhotek byla křídélka zcela otevřená. Zkontrolujte, zda zadní plocha směřuje ven a zda se jemná vnitřní plocha dotýká pokožky.

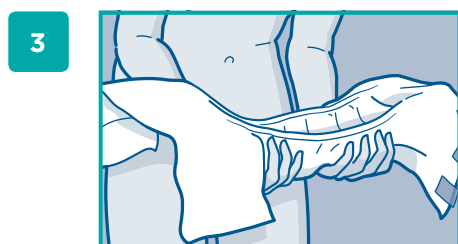


Kalhotky podélně přeložte a nepatrně vytvarujte do tvaru misky. Ochranné bariéry se takto mírně vztyčí. S kalhotkami netřepte.


Nasazení

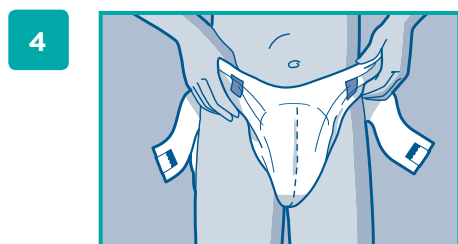

Kalhotky umístěte mezi nohy tak, aby dobře seděly a aby byly v oblasti hýždí pohodlné. Indikátor vlhkosti použijte jako pomůcku pro správné nasazení a vycentrování kalhotek.

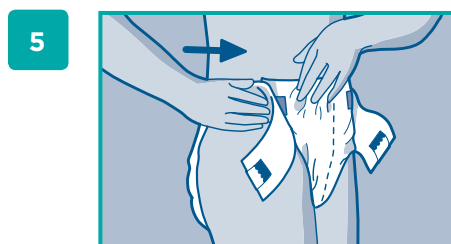

Křídélko jemně přetáhněte přes přední část pomůcky a upevněte pásky.

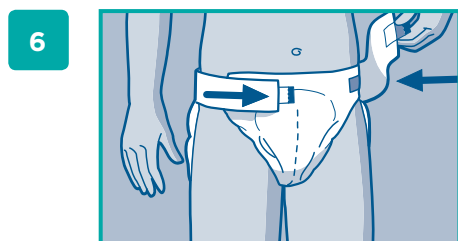

Nejdříve upevněte křídélka na suchý zip, aby pomůcka dobře přilehla k hýždím.

Poté upevněte křídélka s lepicími pásky směrem k sobě, aby pomůcka dobře seděla. Při sundávání kalhotek odtrhněte z modré pásky pásku bílou.



V závislosti na anatomii těla mohou být křídélka použita:

A. Přes sebe

B. Téměř u sebe

C. V blízkosti okraje kalhotek

Tipy a rady

Výběr

- Než použijete kalhotky, zvažte nejprve tvarované vložky Attends, které jsou diskretnější.
- Kalhotky si zvolte podle velikosti pasu nebo boků – volte větší rozměr z nich.
- Na základě množství úniku moči si zvolte odpovídající stupeň absorpce. Předtím, než si vyberete vyšší stupeň, začněte s nižším stupněm absorpce, například stupeň 8, aby Vaše pomůcka byla diskretní a pohodlná.
- Kalhotky nabízejí účinné řešení pro klienty, kterým tvarované vložky nesedí.

Výměna

- Zkontrolujte indikátor vlhkosti – pokud není indikátor vlhkosti vidět na více než polovině délky kalhotek (60%), musí se výrobek vyměnit. Pokud tomu tak není, lze výrobek znovu použít.
- Pokud jsou při použití toalety kalhotky suché a čisté, uzavřete je a opakovaně použijte.
- Pokud chcete kalhotky otevřít, musíte odlepit bílé lepitko, modré by mělo zůstat na svém místě.
- Pásky nelepte na pokožku.
- Pokožku očistěte podle vašich doporučených postupů. Čistěte zepředu směrem dozadu.
- Je-li to možné, nepoužívejte krémy na bázi oleje. Pudry nepoužívejte vůbec. Tyto preparáty ovlivní absorpci kalhotek, moč se bude špatně vstřebávat a vzniká tím riziko poškození pokožky.

Nasazení

- Zkontrolujte, zda se zvlněná část nohavičky nachází na vnější straně kalhotek - udržuje tak nepropustnou zadní vrstvu mimo dosah pokožky.
- Při nasazování pomůcky ponechte fixační pásky vzadu – pak víte, že výrobek nasazujete správně.
- V závislosti na anatomii uživatele se křídélka umístí vodorovně jako pás nebo se upevní dolů směrem k tříslům.
- V případě, že se křídélka překrývají je možné je přilepit i přes sebe.
- Kalhotky je možné obléci i ve stoje, pokud to zdravotní stav uživatele dovolí. Další možností je kalhotky nasadit obráceně a tím křídélka přilepit na zádech.

- Indikátor vlhkosti použijte k vycentrování celé pomůcky.

Únik

- Zkontrolujte správné nasazení a výběr pomůcky.
- Zkontrolujte, zda máte správnou velikost.
- Pomůcky s vyšší absorpční schopností použijte pouze v případě, kdy jste si jisti, že kalhotky nevyhovují a na základě klinického zhodnocení.

Likvidace

- Kalhotky srolujte a zlikvidujte podle platných postupů pro likvidaci klinického odpadu.
- Kalhotky nesplachujte do toalety.

Attends® Slip Active



Attends Slip Active testoval a schválil proDERM, institut pro aplikovaný dermatologický výzkum.

Pro více informací navštivte www.attends.cz