




SLIP CLASSIC


Attends Slip Classic jsou zalepovací plenkové kalhotky určené pro zvládání těžké močové inkontinence a/nebo inkontinence stolice.



Návod k použití

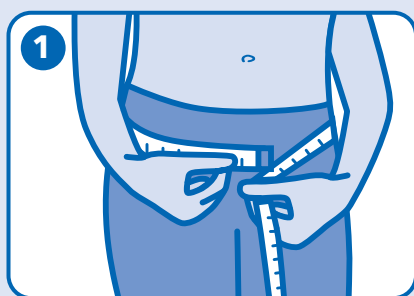


Pro zvolení správné velikosti změřte boky a pas a vyberte větší z těchto rozměrů, abyste našli svou velikost.

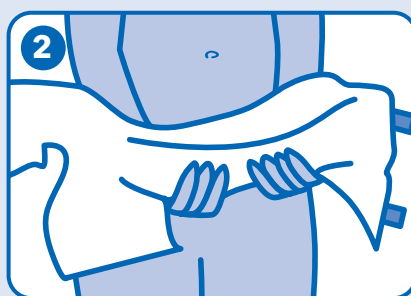


Kalhotky podélně jemně prohněte do tvaru misky, aby došlo k napřimení ochranných bariér.



Kalhotky umístěte mezi nohy tak, aby těsně přiléhaly k tělu a aby byly v oblasti třísel pohodlné. Indikátor vlhkosti použijte jako pomůcku pro správné nasazení a vycentrování kalhotek.

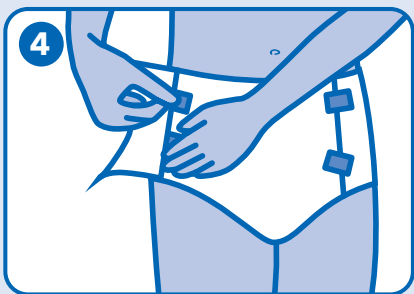

Postranní křídélko jemně přetáhněte přes přední část pomůcky a upevněte lepícími páskami.

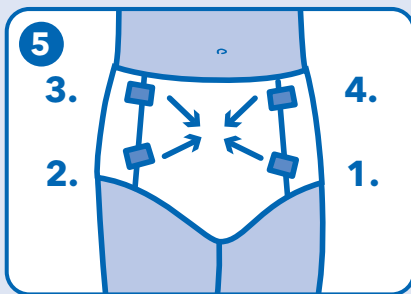

Nejdříve upevněte dolní pásky směrem nahoru, aby pomůcka dobře přiléhala v tříslech. Poté upevněte horní pásky směrem dolů, aby pomůcka dobře seděla. Při sundávání kalhotek odtrhněte bílou pásku z modré pásky.

SLIP CLASSIC

Tipy a rady

Výběr

- Než použijete kalhotky, zvažte nejprve tvarované vložky Attends, které jsou diskrétnější.
- Kalhotky si zvolte podle velikosti pasu nebo boků – volte větší rozměr z nich.
- Kalhotky nabízejí účinné řešení pro klienty, kterým tvarované vložky nesedí.

Nasazení

- Před nasazením kalhotek otevřete a rozložte všechna postranní křídla směrem ven dokud nebudou všechna čtyři otevřena.
- Ujistěte se, že volánky na nohavičkách se nacházejí na vnější straně kalhotek – nepropustná zadní plocha kalhotek takto není v kontaktu s pokožkou.
- Při nasazování pomůcky ponechte fixační pásy vzadu – pak víte, že výrobek nasazujete správně.
- Při fixaci kalhotek nejdříve upevněte dolní pásy směrem nahoru, a pak horní pásy směrem dolů, aby pomůcka dobře seděla.
- Při nasazování pomůcky u ležícího klienta postupujte stejným způsobem jako u klienta stojícího. Při otáčení klienta zasuňte ruku za zadní plochu kalhotek a zkontrolujte, zda je pomůcka správně nasazená.
- Indikátor vlhkosti použijte k vycentrování celé pomůcky.

Výměna

- Zkontrolujte indikátor vlhkosti – pokud není indikátor vlhkosti vidět na více než polovině délky kalhotek (60%), musí se pomůcka vyměnit. Pokud tomu tak není, lze kalhotky dále používat.
- Pokud jsou při použití toalety kalhotky suché a čisté, znovu je nasadte a opakovaně použijte.
- Pokud chcete kalhotky otevřít, musíte odlepit bílé pásy, modré by měly zůstat na svém místě.

Únik

- Zkontrolujte správné nasazení, případně výběr pomůcky.
- Zkontrolujte, zda máte správnou velikost.

Likvidace

- Kalhotky srolujte a zlikvidujte podle platných postupů pro likvidaci odpadu.
- Kalhotky nesplachujte do toalety.



Snášenlivost pokožky
byla dermatologicky
schválena Institutem
proDERM pro Aplikovaný
Dermatologický Výzkum

Pro více informací navštivte www.attends.cz