


Attends[®] Slip Regular



Návod k použití


Příprava

1

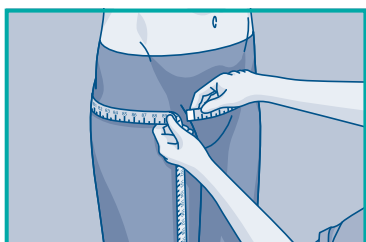


Změřte boky a pas, pro výběr správné velikosti pomůcky použijte větší z těchto dvou rozměrů.

2

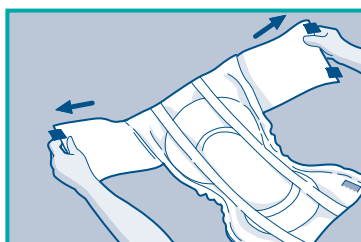

Kalhotky úplně otevřete a okraj s křídélky a fixačními páskami umístěte dozadu, tak aby před nasazením kalhotek byla křídélka zcela otevřená. Zkontrolujte, zda zadní plocha směřuje ven a zda se jemná vnitřní plocha dotýká pokožky.

3

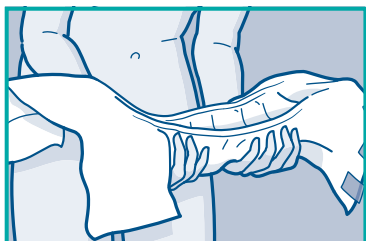

Kalhotky podélně přeložte a nepatrně vytvarujte do tvaru misky. Ochranné bariéry se takto mírně vztyčí. S kalhotkami netřepejte.


Nasazení

4



Kalhotky umístěte mezi nohy tak, aby dobře seděly a aby byly v oblasti hýždí pohodlné. Indikátor vlhkosti použijte jako pomůcku pro správné nasazení a vycentrování kalhotek.

5

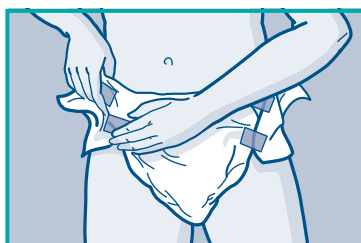

Křídélko jemně přetáhněte přes přední část pomůcky a upevněte pásky.

6



Nejdříve upevněte dolní pásky směrem nahoru, aby pomůcka dobře přilehla k hýždím. Poté upevněte horní pásky směrem dolů, aby pomůcka dobře seděla.

Tipy a rady

Výběr

- Než použijete kalhotky, zvažte nejprve tvarované vložky Attends, které jsou diskretnější.
- Kalhotky si zvolte podle velikosti pasu nebo boků – volte větší rozměr z nich.
- Na základě množství úniku moči si zvolte odpovídající stupeň absorpce. Předtím, než si vyberete vyšší stupeň, začněte s nižším stupněm absorpce, například stupeň 8, aby Vaše pomůcka byla diskretní a pohodlná.
- Kalhotky nabízejí účinné řešení pro klienty, kterým tvarované vložky nesedí.

Výměna

- Zkontrolujte indikátor vlhkosti – pokud není indikátor vlhkosti vidět na více než polovině délky kalhotek (60%), nebo pokud pomůcka obsahuje stolici, je třeba kalhotky vyměnit. Pro Slip Regular velikosti XS, S a XL: Pokud se indikátor vlhkosti změní ze žluté na modrou přes polovinu délky kalhotek (60 %) nebo pokud pomůcka obsahuje stolici, je třeba kalhotky vyměnit. Pokud ne, lze kalhotky stále používat.
- Pokud jsou při použití toalety kalhotky suché a čisté, znovu je nasadte a opakovaně použijte.
- Fixační pásky nelepte na pokožku.
- Pokožku očistěte podle vašich doporučených postupů. Čistěte zepředu směrem dozadu.
- Je-li to možné, nepoužívejte krémy na bázi oleje. Pudry nepoužívejte vůbec. Tyto preparáty ovlivní absorpci kalhotek, moč se bude špatně vstřebávat a tím vzniká riziko poškození pokožky.

Nasazení

- Zkontrolujte, zda se zvlněná část nohavičky nachází na vnější straně kalhotek.
- Při nasazování pomůcky ponechte fixační pásky vzadu – pak víte, že výrobek nasazujete správně.
- Při fixaci kalhotek nejdříve upevněte dolní pásky směrem nahoru, a pak horní pásky směrem dolů, aby pomůcka dobře seděla.
- Při nasazování pomůcky u ležícího klienta postupujte stejným způsobem jako u klienta stojícího. Při otáčení klienta zasuňte ruku za zadní plochu kalhotek a zkontrolujte, zda je pomůcka správně nasazená.
- Indikátor vlhkosti použijte k vycentrování celé pomůcky.

Únik

- Zkontrolujte správné nasazení a výběr pomůcky.
- Zkontrolujte, zda máte správnou velikost.
- Kalhotky s vyšší absorpční schopností použijte pouze v případě, kdy jste si jisti, že kalhotky již vyhovují a na základě klinického zhodnocení.

Likvidace

- Kalhotky srolujte a zlikvidujte podle platných postupů pro likvidaci klinického odpadu.
- Kalhotky nesplachujte do toalety.

Attends® Slip Regular



Attends Slips testoval a schválil proderm, Institut pro aplikovaný dermatologický výzkum (kromě Slip Regular 9XS a 10XL).

Pro více informací navštivte www.attends.cz

Před použitím prostudujte přiložený návod k použití, více informací na www.attends.cz
Zdravotnický prostředek I. třídy.